

नवजात शिशुलाई कृत्रिम श्वासप्रश्वास दिने उपकरणको पुनःप्रशोधन

1. तयारी

सीमित-स्रोत स्थितिमा नवजात शिशुलाई कृत्रिम श्वासप्रश्वास दिने मूलभूत उपकरणको पुनःप्रशोधन निर्देशिकामा दिइएका निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस् (<http://www.path.org/publications/details.php?i=2601>).

- सम्पूर्ण सुरक्षात्मक सामानहरू (पञ्जा, क्याप, मास्क, आँखा संरक्षक उपकरण, एप्रोन, जुताहरू) पहिरिनुहोस्
- पुनःप्रशोधन प्रक्रिया क्षेत्र सफ्फा गर्नुहोस्
- पुनःप्रशोधन गरिने सामग्रीहरू तयार गर्नुहोस्
- पुनःप्रशोधनका लागि आवश्यक भाँडाहरूमा नाम, मिति, र सोल्युशन तयार पारिएको समय लेख्नुहोस्



स्वच्छ युटिलिटी/
जाँच पञ्जाहरू



निर्मल/उच्च स्तरीय
दुषण निवारन/
निस्संक्रमित पञ्जाहरू

2. पूर्व निस्संक्रमण

पूर्व-सफाई क्लोरीन सोल्युशन 0.5% मा भिजाइएको गोजले उपकरणलाई पुछ्नुहोस्।	पुर्जाहरू फुकाल्नु उपकरणका पुर्जाहरूलाई पूरा फुकाल्नुहोस्।	सफाई सबै पुर्जाहरूलाई सफ्फा पानी र हल्का साबुनले धुनुहोस्। कुनै ठोस मैला छ भने ब्रुशले त्यसलाई सफ्फा गर्नुहोस्।	पखाल्नु सबै पुर्जाहरूलाई सफ्फा पानीले पखाल्नुहोस्।	लाइमस्केल हटाउनुहोस् (आवश्यक छ भनेमात्रै) पानी र ह्वाइट भिनेगर (3-5%) बराबर भाग मिसाएर उपकरणलाई 10 मिनेटसम्म भिजाउनुहोस् र त्यसपछि पखाल्नुहोस्। आवश्यक भए यो प्रक्रिया दोहोर्‍याउनुहोस्।	सुकाउनु (निर्मलिकरण वा रासायनिक निस्संक्रमण पूर्व) सफ्फा गोज वा लुगाले पुछ्नुहोस्।
---	--	---	--	--	--

3. निस्संक्रमण

कुनै एक विधिले निस्संक्रमण गर्नुहोस् निर्मलिकरण: अटोक्लेभिङ्ग दिशा निर्देशनमा उपकरण निर्माताका निर्देशनहरू वा समय/तापमान तालिकाको अनुगमन गर्नुहोस्	उच्च स्तरीय निस्संक्रमण: उच्च स्तरीय निस्संक्रमण: रासायनिक सफ्फा पानीमा 20 मिनेट सम्म उमाल्नुहोस् वा बाफा लगाउनुहोस्। क्लोरीन सोल्युशन 0.5% मा 20 मिनेट भिजाउनुहोस्; वा ग्लुटोरलडिहाइड सोल्युशन 2.4% रसायन निर्माताका निर्देशनहरूको अनुगमन गर्नुहोस्। उम्लेको पानीका 3 छुट्टाछुट्टै भाँडाहरूमा हरेकमा एक मिनेटसम्म पखाल्नुहोस्।	निकाल्नुहोस् पुर्जाहरूलाई एसेप्टिक प्रविधिद्वारा निकाल्नुहोस्।	सुकाउनुहोस् निर्मल गोजले पुछ्नुहोस् वा सुरक्षित स्थानमा हावाले सुकाउनुहोस्।
---	---	--	---

4. निस्संक्रमण पश्चात

जाँच्नुहोस् नोक्सानी भएको छ कि भनेर, सफाई र खनिज ठोस फोहोरहरू आँखाले हेर्दै जाँच्नुहोस्। सफ्फा भएको छैन भने पुनःप्रशोधन प्रक्रिया फेरि दोहोर्‍याउनुहोस्। क्षतिग्रस्त पुर्जाहरूलाई फेर्नुहोस्।	पुर्जाहरू फेरि जोड्नुहोस् उपकरणलाई फेरि पूरा जोड्नुहोस्।	कार्य परीक्षण* ब्यागलाई दुबाउनुहोस् र भाल्म खोलिएको हेर्नुहोस्। मास्कलाई सील गर्नुहोस् र जोडले दबाउनुहोस् अनि प्रेसर रिलिज भाल्मबाट हावा निस्कँदै छ वा छैन भनेर सुन्नुहोस्। सिल लगाइराखेर नै हरेकपटक दबाएपछि ब्याग फेरि फुल्छ वा फुल्दैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। सक्शन उपकरणलाई दबाउनुहोस्, टुप्पोलाई थुन्नुहोस्, र छोड्नुहोस्। टुप्पोलाई नछोडिएसम्म उपकरण फुल्लिनु हुँदैन।	भण्डारण उपकरणलाई उच्च स्तरीय निस्संक्रमित प्लास्टिक वा धातुको भाँडामा ढक्कनी राम्ररी बन्द गरेर वा अटो क्लेम्ड लुगामा बेहेर राख्नुहोस्।
---	--	---	--



*कुनै जाँच असफल हुन्छ भने पुर्जाहरू फेरि खोल्नुहोस् र जोर्नुहोस् अनि सबै जाँच दोहोर्‍याउनुहोस्। फेरिपनि जाँच असफल हुन्छ भने उपकरणलाई सेवाबाट हटाउनुहोस्।



Helping Babies Breathe
THE GOLDEN MINUTE

American Academy of Pediatrics
DEDICATED TO THE HEALTH OF ALL CHILDREN™



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

PATH
10011200