

## TESTES RÁPIDOS SD BIOLINE

ONCOCERCOSE IgG4 • FILARÍASE LINFÁTICA IgG4 • ONCOCERCOSE E FILARÍASE LINFÁTICA IgG4 BIPLEX


# Como utilizar as Amostras de CQ Diário

As amostras de CQ Diário são fornecidas individualmente: Negativo quanto a Q5010, Anti-Ov16 Q5011 e Anti-Wb123 Q5012.

Os folhetos informativos da Amostra de CQ Diário são embalados com os frascos. Cada frasco contém 100 µl.

É recomendado que as Amostras de CQ Diário sejam analisadas todos os dias por cada equipa no local antes do teste de campo.

As Amostras de CQ Diário devem ser utilizadas antes de utilizar um lote de testes novo.

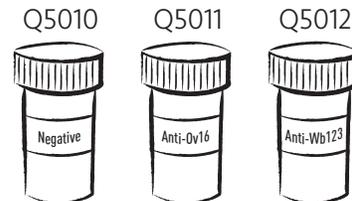

O **Teste Rápido SD BIOLINE Oncocercose IgG4** deve utilizar: A) Amostra de CQ Diário Q5010 **Negativa** e B) Amostra de CQ Diário Q5011 **Anti-Ov16** IgG4.

O **Teste Rápido SD BIOLINE Filaríase Linfática IgG4** deve utilizar: A) Amostra de CQ Diário Q5010 **Negativa** e B) Amostra de CQ Diário Q5012 **Anti-Wb123** IgG4.

O **Teste Rápido SD BIOLINE Oncocercose e Filaríase Linfática IgG4 Biplax** deve utilizar: A) Amostra de CQ Diário Q5010 **Negativa**, B) Amostra de CQ Diário Q5011 **Anti-Ov16** IgG4 e C) Amostra de CQ Diário Q5012 **Anti-Wb123** IgG4.

**PASSO 1.** Para os testes SD BIOLINE em utilização, selecione as Amostras de CQ Diário adequadas. **Execute um teste rápido com cada Amostra de CQ Diário.**

- Verifique o prazo de validade do teste e o dessecante.
- Utilize uma pipeta capilar nova fornecida com o teste. Comprima a pipeta capilar e coloque no frasco da Amostra de CQ Diário. Solte lentamente a pressão da pipeta capilar para extrair a amostra até à linha (ver imagens do lado direito).
- Coloque a pipeta capilar na **cavidade da amostra redonda**. Não utilize força excessiva.

Comprima cuidadosamente para soltar a amostra. Aguarde a absorção do líquido. Elimine a pipeta no recipiente para material cortante.

**Não reutilize as pipetas capilares.**



ADICIONE AMOSTRA



**PASSO 2.** Adicione **quatro gotas** do diluente de ensaio fornecido com o kit de teste SD BIOLINE na **cavidade do diluente de ensaio quadrada**.

**Não adicione diluente de ensaio na cavidade da amostra redonda.**

ADICIONE 4 GOTAS DE DILUENTE DE ENSAIO



## TESTES RÁPIDOS SD BIOLINE

ONCOCERCOSE IgG4 • FILARÍASE LINFÁTICA IgG4 • ONCOCERCOSE E FILARÍASE LINFÁTICA IgG4 BIPLEX

# Como utilizar as Amostras de CQ Diário

PASSO 3. Para o Teste Rápido Oncocercose IgG4, aguarde **20 minutos**.

Para o Teste Rápido Filaríase Linfática IgG4 e para o Teste Rápido Onco/FL IgG4 Biplax, aguarde **30 minutos**

ONCOCERCOSE:  
20 MINUTOS



FILARÍASE LINFÁTICA:  
30 MINUTOS



FILARÍASE LINFÁTICA  
ONCO/FL BIPLEX:  
30 MINUTOS



PASSO 4. Leia os testes de acordo com as instruções do Teste SD BIOLINE.

### Teste Rápido SD BIOLINE Oncocercose IgG4:


- A Amostra de CQ Diário Negativo deve ter uma linha no C (válido) e nenhuma linha no T (negativo).
- A Amostra de CQ Diário IgG4 Anti-Ov16 deve ter uma linha no C (válido) e uma linha no T (positivo).



POSITIVO QUANTO A ONCO (REATIVO)

### Teste Rápido SD BIOLINE Filaríase Linfática IgG4:

- A Amostra de CQ Diário Negativo deve ter uma linha no C (válido) e nenhuma linha no L (negativo).
- A Amostra de CQ Diário IgG4 Anti-Wb123 deve ter uma linha no C (válido) e uma linha no L (positivo).

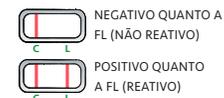

POSITIVO QUANTO A FL (REATIVO)

### Teste Rápido SD BIOLINE Oncocercose e Filaríase Linfática IgG4 Biplax:

- A Amostra de CQ Diário Negativo deve ter uma linha no C (válido) e nenhuma linha no O ou no L (negativo).
- A Amostra de CQ Diário IgG4 Anti-Ov16 deve ter uma linha no C (válido), uma linha no O (positivo) e nenhuma linha no L (negativo).
- A Amostra de CQ Diário IgG4 Anti-Wb123 deve ter uma linha no C (válido), nenhuma linha no O (negativo) e uma linha no L (positivo).



POSITIVO QUANTO A ONCO (REATIVO)



PASSO 5. Se os resultados forem os descritos no Passo 4, prossiga com o teste de campo.

Se os resultados não forem os descritos no Passo 4, NÃO continue o teste de campo. Consulte um supervisor antes de continuar. Se não forem obtidos os resultados esperados após a repetição do teste, contacte a PATH e partilhe as suas fichas de recolha de dados.



Este documento deve ser impresso a cores para ser válido.

Para obter mais informações ou para questões relacionadas com a formação, contacte o Programa de Diagnóstico da PATH através de [dxinfo@path.org](mailto:dxinfo@path.org).

