

## TESTS RAPIDES SD BIOLINE

ONCHOCERCIASIS IgG4 • LYMPHATIC FILARIASIS IgG4 • ONCHOCERCIASIS ET LYMPHATIC FILARIASIS IgG4 BIPLEXE


# Comment utiliser les échantillons de contrôle de qualité quotidien

Les échantillons de contrôle de qualité quotidien sont fournis individuellement : Q5010 négatif, Q5011 anti-Ov16 et Q5012 anti-Wb123

La notice du produit de l'échantillon de contrôle de qualité quotidien est fournie avec les flacons. Chaque flacon contient 100 µl.

Il est recommandé de réaliser les échantillons de contrôle de qualité quotidien tous les jours par chaque équipe de terrain avant de tester les échantillons de participants.

Les échantillons de contrôle de qualité quotidien doivent être utilisés avant d'utiliser un nouveau lot de tests.

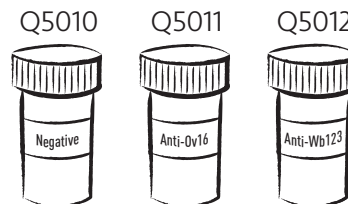

**Le test rapide SD BIOLINE Onchocerciasis IgG4** doit utiliser : A) l'échantillon de contrôle de qualité quotidien **négatif** Q5010 et B) l'échantillon de contrôle de qualité quotidien IgG4 **anti-Ov16** Q5011.

**Le test rapide SD BIOLINE Lymphatic Filariasis IgG4** doit utiliser : A) l'échantillon de contrôle de qualité quotidien **négatif** Q5010 et B) l'échantillon de contrôle de qualité quotidien IgG4 **anti-Wb123** Q5012.


**Le test rapide biplexe SD BIOLINE Onchocerciasis and Lymphatic Filariasis IgG4** doit utiliser : A) l'échantillon de contrôle de qualité quotidien **négatif** Q5010, B) l'échantillon de contrôle de qualité quotidien IgG4 **anti-Ov16** Q5011 et C) l'échantillon de contrôle de qualité quotidien IgG4 **anti-Wb123** Q5012.

ÉTAPE 1. Pour le test SD BIOLINE utilisé, choisissez les échantillons de contrôle de qualité quotidien appropriés. **Exécutez un test rapide avec chaque échantillon de contrôle de qualité quotidien.**

- Vérifiez la date de péremption et le déshydratant.
- Utilisez une nouvelle pipette capillaire fournie avec le test. Appuyez sur la pipette capillaire et placez-la dans le flacon de l'échantillon de contrôle de qualité quotidien. Relâchez doucement la pression exercée sur la pipette capillaire pour aspirer l'échantillon jusqu'à la ligne (voir images à droite).
- Placez la pipette capillaire dans **le puits d'échantillon rond**. N'appuyez pas trop fort.

Pressez doucement pour libérer l'échantillon. Laissez le liquide s'absorber. Mettez au rebut la pipette capillaire dans le conteneur pour objets pointus et tranchants.

**Ne réutilisez pas les pipettes capillaires.**

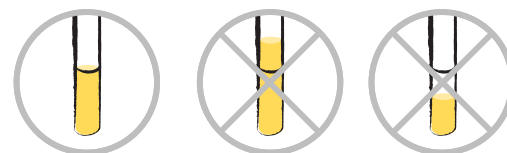


AJOUT  
D'ÉCHANTILLON



ÉTAPE 2. Ajoutez **quatre gouttes** du diluant de dosage fourni avec le kit de test SD BIOLINE dans **le puits carré** prévu à cet effet.

**N'ajoutez pas de diluant de dosage au puits rond d'échantillon.**

AJOUTEZ  
4 GOUTTES  
DU DILUANT  
DE DOSAGE

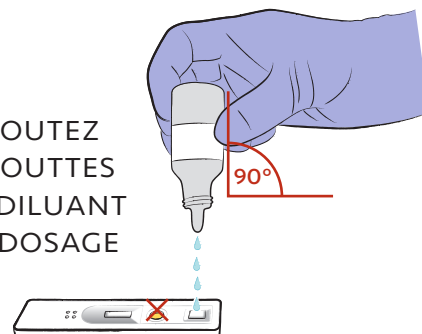

## TESTS RAPIDES SD BIOLINE

ONCHOCERCIASIS IgG4 • LYMPHATIC FILARIASIS IgG4 • ONCHOCERCIASIS ET LYMPHATIC FILARIASIS IgG4 BIPLEXE

# Comment utiliser les échantillons de contrôle de qualité quotidien

ÉTAPE 3. Attendez **30 minutes** pour le test rapide Onchocerciasis IgG4.

Attendez **30 minutes** pour le test rapide Lymphatic Filariasis IgG4 et pour le test rapide biplese Oncho/LF IgG4.

ONCHOCERCIASIS :  
30 MINUTES



LYMPHATIC FILARIASIS :  
30 MINUTES



LYMPHATIC FILARIASIS  
ONCHO/LF BIPLEX :  
30 MINUTES



ÉTAPE 4. Lisez les tests conformément aux instructions du test SD BIOLINE.

### Test rapide SD BIOLINE Onchocerciasis IgG4 :

- L'échantillon de contrôle de qualité quotidien négatif doit avoir une ligne au niveau de C (valide) et ne pas présenter de ligne au niveau de T (négatif).
- L'échantillon de contrôle de qualité quotidien IgG4 anti-Ov16 doit avoir une ligne au niveau de C (valide) et présenter une ligne au niveau de T (positif).



### Test rapide SD BIOLINE Lymphatic Filariasis IgG4 :

- L'échantillon de contrôle de qualité quotidien négatif doit avoir une ligne au niveau de C (valide) et ne pas présenter de ligne au niveau de L (négatif).
- L'échantillon de contrôle de qualité quotidien IgG4 anti-Wb123 doit avoir une ligne au niveau de C (valide) et présenter une ligne au niveau de L (positif).



### Test rapide biplese SD BIOLINE Onchocerciasis and Lymphatic Filariasis IgG4 :

- L'échantillon de contrôle de qualité quotidien négatif doit avoir une ligne au niveau de C (valide) et ne pas présenter de ligne au niveau de O ou de L (négatif).
- L'échantillon de contrôle de qualité quotidien IgG4 anti-Ov16 doit avoir une ligne au niveau de C (valide), présenter une ligne au niveau de O et ne pas avoir de ligne au niveau de L (positif pour l'onchocercose).
- L'échantillon de contrôle de qualité quotidien IgG4 anti-Wb123 doit avoir une ligne au niveau de C (valide), présenter une ligne au niveau de L et ne pas avoir de ligne au niveau de O (positif pour la filariose lymphatique).



ÉTAPE 5. Si les résultats sont tels que décrits à l'étape 4, procédez aux tests sur les échantillons de participants.

Répétez les tests et si les résultats attendus ne sont pas obtenus, contactez PATH et partagez vos formulaires de données.



Ce document doit être imprimé **en couleur** pour être valide.

Pour de plus amples informations ou pour toute question liée à la formation, contactez les membres du programme de diagnostic de PATH à l'adresse [dxinfo@path.org](mailto:dxinfo@path.org).

