



Utilisation du panel de formation

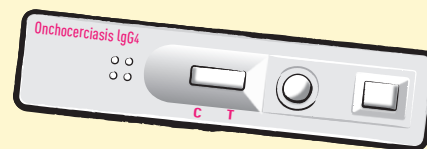

Contenu du panel de formation Q5001 d'IgG4 anti-Ov16 :

- 4 membres du panel avec 300 µL de liquide dans chaque flacon :
 - Negative (Négatif)
 - Low positive (Faiblement positif)
 - Medium positive (Moyennement positif)
 - High positive (Fortement positif)

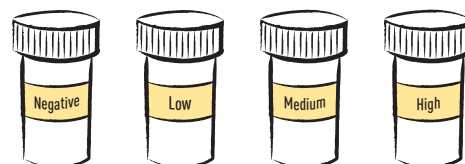

- Notice du produit du panel de formation IgG4 anti-Ov16, numéro de produit Q5001.


Matériel requis mais non fourni :

- Kit de test rapide SD BIOLINE Onchocerciasis IgG4
 - 4 tests rapides
 - 4 pipettes capillaires
 - Diluant de dosage du kit de test

ÉTAPE 1. Chaque membre du panel sera employé sur un test rapide différent.

Pour chaque test rapide :


- Vérifiez la date d'expiration sur le sachet du test rapide. N'utilisez pas un test rapide périmé.
- Vérifiez que les billes du paquet de déshydratant sont jaunes et blanches. S'il contient des billes vertes, n'utilisez pas le test.

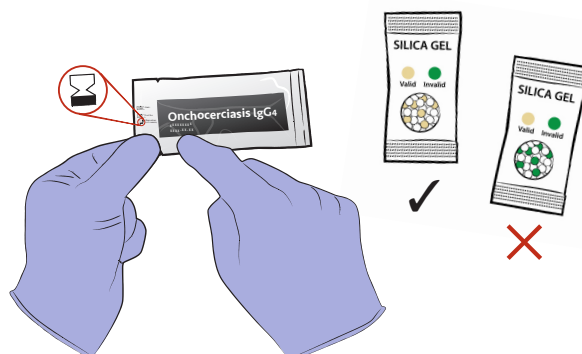


ÉTAPE 2. Utilisez une nouvelle pipette capillaire fournie avec le kit de test Onchocerciasis IgG4.

- Pressez la pipette capillaire et placez-la dans le membre du panel que vous souhaitez utiliser. Relâchez doucement la pression exercée sur la pipette capillaire pour aspirer l'échantillon jusqu'à la ligne (voir images à droite).
- Placez la pipette capillaire dans **le puits d'échantillon rond**. N'appuyez pas trop fort. Pressez doucement pour libérer l'échantillon. Laissez le liquide s'absorber. Mettez au rebut la pipette capillaire dans le conteneur pour objets pointus et tranchants.

Ne réutilisez pas les pipettes capillaires.

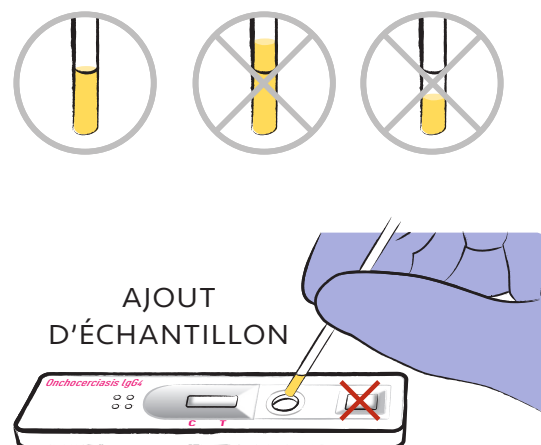


Utilisation du panel de formation

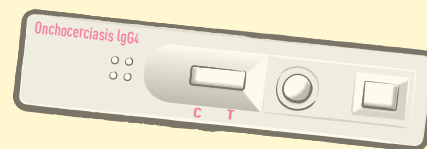

ÉTAPE 3. Ajoutez **quatre gouttes** du diluant de dosage fourni avec le kit de test Onchocerciasis IgG4 dans **le puits carré** prévu à cet effet.

N'ajoutez pas de diluant de dosage au puits rond d'échantillon.

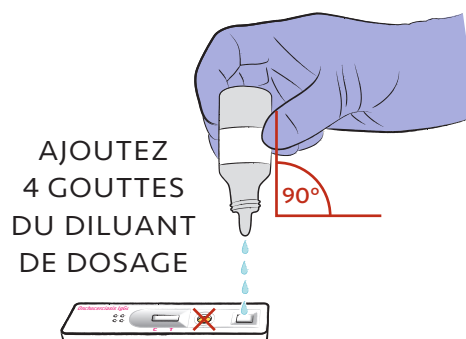


ÉTAPE 4. Attendez 30 minutes.




ÉTAPE 5. Lisez les résultats du test. L'intensité des résultats de test positifs sera variable. Aucune ligne de test ne devrait être visible pour le négatif.

Ne lisez pas un test réalisé il y a plus de 24 heures.

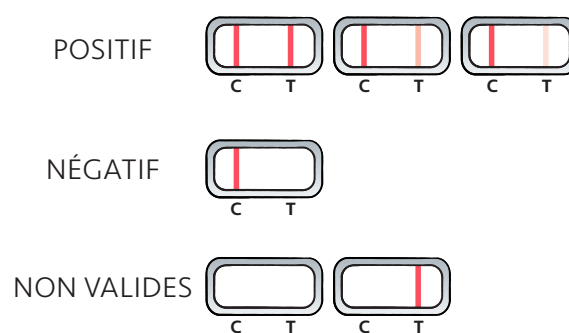

ÉTAPE 6. Utilisez la fiche de données du panel de formation fournie à la fin de ces instructions pour consigner le résultat de chaque test rapide.

Jetez les tests rapides usagés dans le conteneur pour déchets présentant un danger de contamination. Les membres du panel de formation peuvent être utilisés pendant 2 jours maximum, puis ils doivent être jetés dans le conteneur pour déchets présentant un danger de contamination.

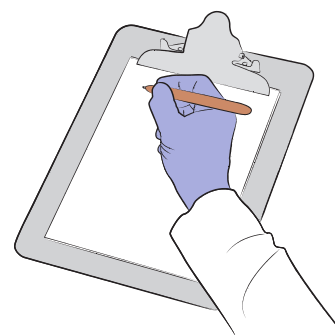

Ce document doit être imprimé **en couleur** pour être valide.

Pour de plus amples informations ou pour toute question liée à la formation, contactez les membres du programme de diagnostic de PATH à l'adresse dxinfo@path.org.

