

TESTE RÁPIDO SD BIOLINE ONCOCERCOSE E FILARÍASE  
LINFÁTICA IgG4 BIPLEX

## Como utilizar o Painel de Garantia de Qualidade



Conteúdos incluídos no Anti-Ov16/Wb123 IgG4  
Painel de Garantia de Qualidade Q5008:

- 10 membros do painel com 200 µl de líquido em cada frasco:

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| - O: 0 ng/ml, L: 0 ng/ml   | - O: 25 ng/ml, L: 0 ng/ml    |
| - O: 0 ng/ml, L: 25 ng/ml  | - O: 50 ng/ml, L: 0 ng/ml    |
| - O: 0 ng/ml, L: 50 ng/ml  | - O: 100 ng/ml, L: 0 ng/ml   |
| - O: 0 ng/ml, L: 100 ng/ml | - O: 50 ng/ml, L: 1000 ng/ml |
| - O: 0 ng/ml, L: 200 ng/ml | - O: 500 ng/ml, L: 100 ng/ml |



- Folheto Informativo do Painel de Garantia de Qualidade Anti-Ov16/Wb1234, Número de Produto Q5008.
- Ficha de Dados do Painel de Controlo de Qualidade (CQ) Diário do Teste Rápido SD BIOLINE Oncocercose e Filaríase Linfática IgG4 Bplex.

Materiais necessários, mas não fornecidos:


- Kits de Teste Rápido SD BIOLINE Oncocercose e Filaríase Linfática IgG4 Bplex
  - 80 testes rápidos
  - Diluente de ensaio dos kits de teste
- Pipeta volumétrica e pontas das pipetas, adequadas para fornecer 10 µl

PASSO 1. Retire o painel do congelador e aguarde que atinja a temperatura ambiente. Bata levemente nos frascos fechados várias vezes para misturar o conteúdo e agite firmemente em sentido descendente para se certificar de que não existe qualquer líquido na tampa.

PASSO 2. **Cada membro do painel será analisado em 8 testes rápidos separados, num total de 80 testes rápidos.**

Para cada teste rápido:

- Verifique o prazo de validade na bolsa do teste rápido. Não utilize um teste rápido após o prazo de validade ter terminado.
- Verifique se existem gotas amarelas e brancas na embalagem do dessecante. Se apresentar quaisquer gotas verdes, não utilize o teste.

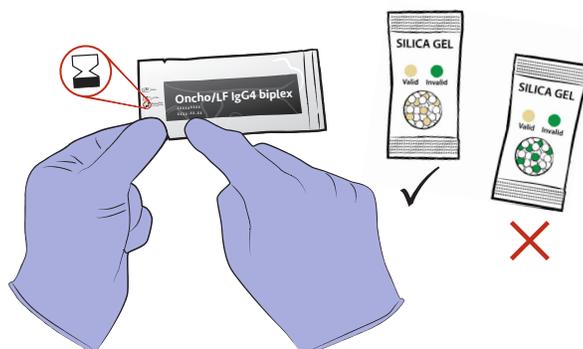

PASSO 3. Utilize uma pipeta para adicionar **10 µl** de solução na **cavidade da amostra redonda**. Utilize uma ponta da pipeta nova para cada membro do painel.



TESTE RÁPIDO SD BIOLINE ONCOCERCOSE E FILARÍASE  
LINFÁTICA IgG4 BIPLEX

Como utilizar o Painel de Garantia de Qualidade



PASSO 4. Adicione **4 gotas** do diluente de ensaio fornecido no kit de teste Onco/FL IgG4 Biplax na **cavidade do diluente de ensaio quadrada**.

**Não adicione diluente de ensaio na cavidade da amostra redonda.**




PASSO 5. Espere 30 minutos.

30 MINUTOS



PASSO 6. Leia os resultados do teste rápido após 30 minutos. Os resultados do teste positivos apresentam diferentes graus de intensidade.

Utilize a Ficha de Dados do Painel de GQ do Teste Rápido SD BIOLINE Onco/FL IgG4 Biplax fornecida com o Painel de Garantia de Qualidade (Q5008) para registrar o resultado de cada teste rápido.

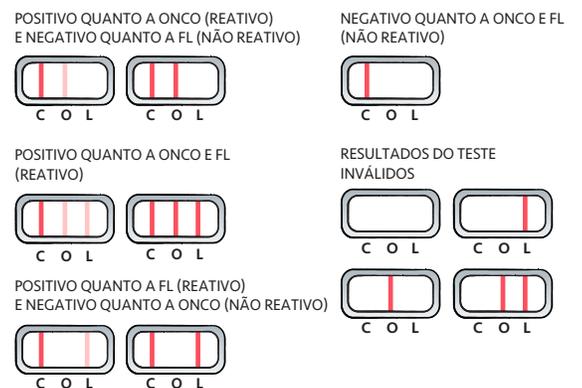

PASSO 7. Os testes devem cumprir os critérios apresentados na tabela. Se os resultados de GQ não cumprirem estes critérios, contacte a PATH através de [dxinfo@path.org](mailto:dxinfo@path.org) e partilhe as suas fichas de recolha de dados. Elimine os testes rápidos usados e os membros do painel de GQ como resíduos de risco biológico.

	Concentração de oncocercose (O)	Concentração de FL (L)	Resultado da linha O	Resultado da linha L
1	0 ng/ml	0 ng/ml	Negativo em todas as réplicas	Negativo em todas as réplicas
2	0 ng/ml	25 ng/ml	Negativo em todas as réplicas	Positivo em, pelo menos, (4/8) 50% das réplicas
3	0 ng/ml	50 ng/ml	Negativo em todas as réplicas	Positivo em, pelo menos, (4/8) 50% das réplicas
4	0 ng/ml	100 ng/ml	Negativo em todas as réplicas	Positivo em todas as réplicas
5	0 ng/ml	200 ng/ml	Negativo em todas as réplicas	Positivo em todas as réplicas
6	25 ng/ml	0 ng/ml	Positivo em, pelo menos, (4/8) 50% das réplicas	Negativo em todas as réplicas
7	50 ng/ml	0 ng/ml	Positivo em todas as réplicas	Negativo em todas as réplicas
8	100 ng/ml	0 ng/ml	Positivo em todas as réplicas	Negativo em todas as réplicas
9	50 ng/ml	1000 ng/ml	Positivo em todas as réplicas	Positivo em todas as réplicas
10	500 ng/ml	100 ng/ml	Positivo em todas as réplicas	Positivo em todas as réplicas

Este documento deve ser impresso a cores para ser válido.

Para obter mais informações ou para questões relacionadas com a formação, contacte o Programa de Diagnóstico da PATH através de [dxinfo@path.org](mailto:dxinfo@path.org).

