

Avant de commencer :

- Lire l'intégralité du mode d'emploi avant toute utilisation.
- Recouvrir la surface de travail d'une protection jetable, absorbante et propre.
- Tous les composants doivent être amenés à température ambiante (entre 15 et 30 °C) avant le début du test.


Préparation :

- Sachet de test (dispositif de test)
- Diluant de dosage
- Tampon imbibé d'alcool
- Lancette
- Pipette capillaire jetable (10 µl)
- Minuteur et gants jetables (non fournis)


1 Vérifier la date de péremption.
Si la date de péremption est dépassée, utiliser un autre kit.

Vérifier l'agent déshydratant.

Si la couleur est verte, utiliser un autre kit.

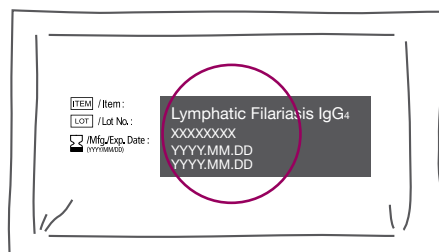


2 Mettre les gants.
Utiliser des gants neufs pour chaque patient.

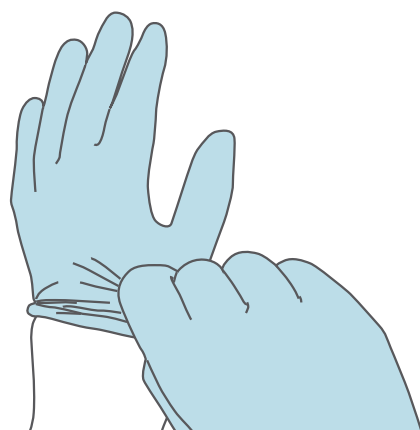


3 Ouvrir le sachet de test et l'étiquette contenant l'identifiant du patient.

Ne pas utiliser d'étiquettes qui obstrueraient les ouvertures d'air.

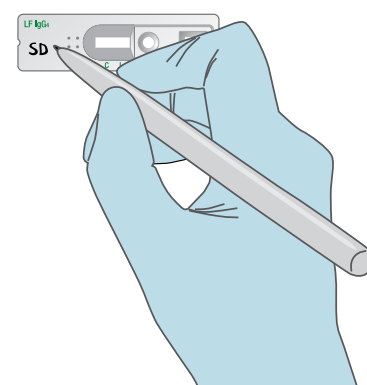

4 Ouvrir l'emballage d'un tampon imbibé d'alcool. Prendre l'annulaire de la main non dominante.


Nettoyer le doigt en effectuant un mouvement circulaire. Laisser sécher à l'air libre pendant 10 secondes.

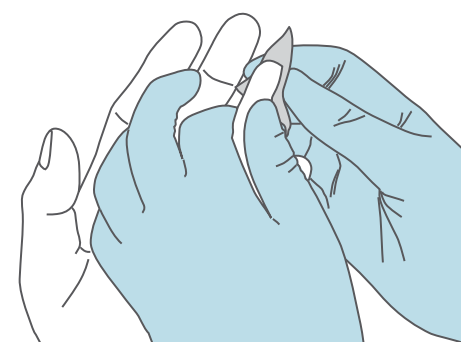


5 À l'aide de la lancette, piquer le doigt du patient pour obtenir une goutte de sang.



Mettre au rebut la lancette dans le conteneur pour objets pointus et tranchants.

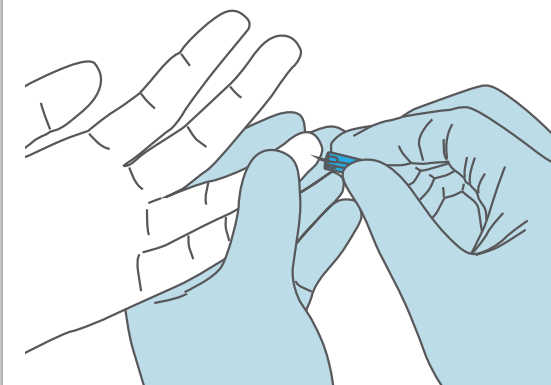


6 Attendre qu'une goutte de sang se forme sur le doigt. Appuyer doucement sur la pipette capillaire et la maintenir. Placer la pointe de la pipette sur la goutte de sang et relâcher la pression pour recueillir du sang jusqu'à la ligne de remplissage.

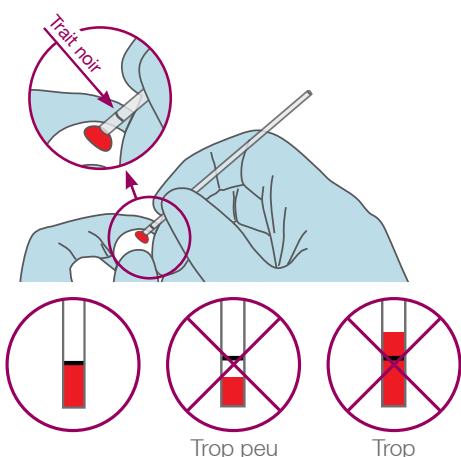

7 Placer la pipette capillaire dans le puits rond d'échantillon. Appuyer à nouveau pour libérer le sang et laisser le puits d'échantillon l'absorber.





Jeter la pipette dans le conteneur pour objets pointus et tranchants une fois le sang ajouté.

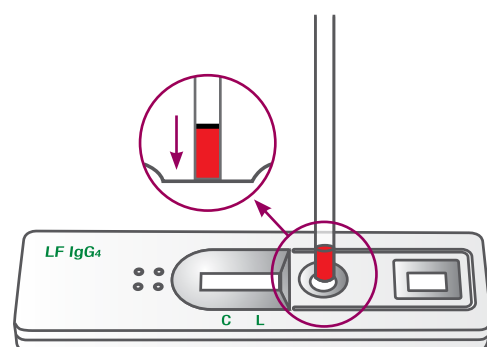

8 Ajouter **quatre gouttes** de diluant de dosage dans le puits carré du diluant de dosage.

4 x

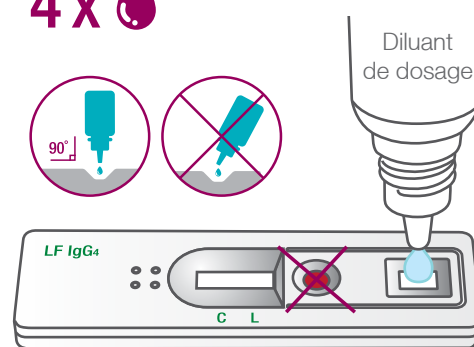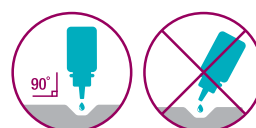

9




Interpréter les résultats **30 minutes** après le dépôt du diluant de dosage

Les résultats sont valides dès 30 minutes et pendant 24 heures.

La ligne de contrôle doit apparaître pour tous les résultats. Si elle n'apparaît pas, le résultat est considéré comme non valide et l'échantillon doit être retesté avec un nouveau kit de test.

+ Positif (réactif)

Réactif pour la filariose lymphatique

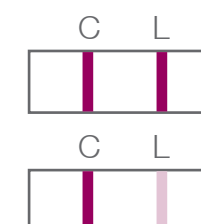

- Négatif (non réactif)



✗ Non valide

